

KeriFix[®] KeriLock[®]

Ancre de suture




Fully committed to **Hand & Wrist** only

www.kerimedical.com

KeriFix[®]




Surface d'accroche large grâce au design des ailettes

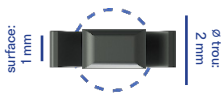

Ancrage sous cortical performant et bonne tenue de l'ancre grâce à l'expansion des ailettes


Petite taille de l'ancre optimale avec une longueur de 3,8 mm et un diamètre de 2 mm

Deux références de fils double aiguillés à haute performance KeriFiber et une référence de fil double aiguillé en polyester

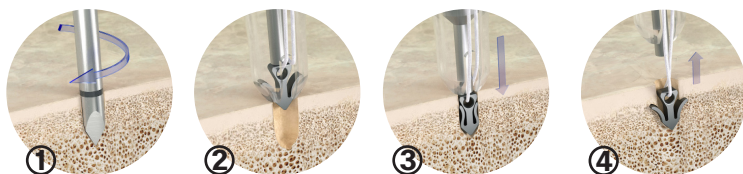

- ① préparer le site d'implantation à l'aide de l'ancillaire de pré-perçage
- ② positionner l'ancre en alignant perpendiculairement l'ancillaire de pose avec le pré-trou
- ③ appliquer une pression sur l'ancillaire de pose afin d'expulser l'ancre
- ④ libérer le fil de suture et les aiguilles. Tirer légèrement afin de vérifier l'ancrage et le positionnement

- + Accroche
Surface d'accroche large grâce
au design des ailettes

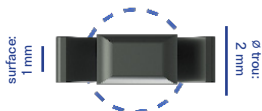


- + Tenue
Ancrage sous cortical performant et bonne tenue
de l'ancre grâce à l'expansion des ailettes
- + Taille optimale
Petite taille de l'ancre optimale avec une longueur
de 3,8 mm et un diamètre de 2 mm
- + Fils
Deux références de fils double aiguillés à haute
performance KeriFiber et une référence de fil
double aiguillé en polyester



Surface d'accroche élargie grâce au filet de 2,4 mm

Protection du fil au moment du vissage grâce à l'ancillaire

Deux références de fils double aiguillés à haute performance KeriFiber et une référence de fil double aiguillé en polyester

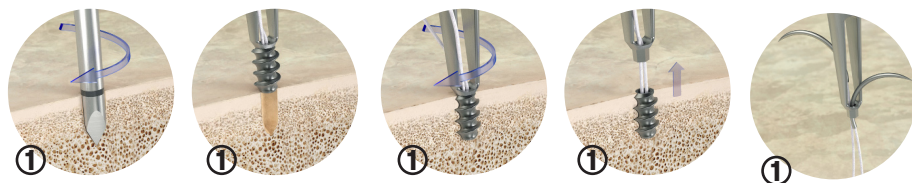

- ① préparer le site d'implantation à l'aide de l'ancillaire de pré-perçage
- ② positionner l'ancre en alignant perpendiculairement l'ancillaire de pose avec le pré-trou
- ③ appliquer une pression sur l'ancillaire de pose afin d'expulser l'ancre
- ④ libérer le fil de suture et les aiguilles. Tirer légèrement afin de vérifier l'ancrage et le positionnement
- ④ libérer le fil de suture et les aiguilles. Tirer légèrement afin de vérifier l'ancrage et le positionnement



KeriMedical Suisse - Siège Social
Route des Acacias, 45a
1227 Genève - Suisse
Tél: +41 (0) 58 255 01 30
Fax: +41 (0) 58 255 01 40
customerservice@kerimedical.com

KeriMedical France
ActiPro - 219 rue Laszlo Biro
74160 Archamps - France
Tél: +33 (0) 4 50 85 36 10
Fax: +33 (0) 4 80 16 05 10
adv@kerimedical.com

**KeriMedical
Allemagne GmbH**
Friedrich-Koenig-Str. 3
55129 Mayence - Allemagne
Tél: +49 (0) 6131 617 69 26
Fax: +49 (0) 6131 617 69 28
officegermany@kerimedical.com