

RHIZARTROSE of ARTROSE VAN DE DUIMBASIS




Wat is rhizartrose ?

Rhizartrose is de medische naam voor artrose van de duim.

Het is een progressieve destructie van het kraakbeen. Het gewricht tussen het trapezium (handwortelbeentje) en het 1e middenhandsbeentje is versleten en verhindert dat de duim normaal functioneert (knijpbeweging). Het heeft verschillende oorzaken (anatomische aanleg, erfelijkheid, gevolgen van trauma, etc.).

Locatie

Rhizartrose komt voor in het trapeziometacarpale (TMC) aan de basis van de duim, vlakbij de pols.

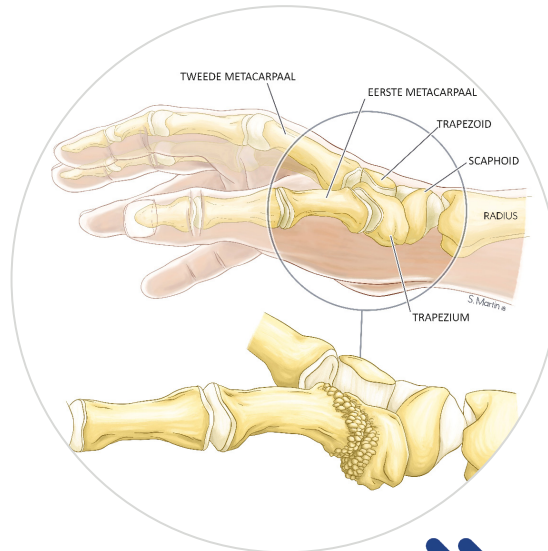

Wist je dat ?

Rhizartrose is de meest voorkomende slijtageziekte van het handkraakbeen. Het treft 1 op de 3 vrouwen na de menopauze en 1 op de 8 mannen (Réf : Buckland Wright J C).


Waarom opereren ?

Als medische behandeling geen effect heeft en als er geen behandeling wordt uitgevoerd, kunnen er ernstige pijnaanvallen ontstaan aan de basis van de duim (vlakbij de pols) en kunnen er invaliderende functionele ongemakken optreden bij alledaagse bewegingen:

- moeite met knijpen
- gebrek aan kracht
- progressieve verstijving, met verminderde opening tussen duim en wijsvinger
- vervorming van de duim, met het verschijnen van een bult («papegaaienbek») die een zigzagduim kan creëren die bekend staat als een «Z-duim».


Waarom schrijft mijn chirurg een TMC prothese voor ?

Het doel van de operatie is om de achteruitgang van het gewricht te behandelen, de pijn weg te nemen en de functie van de duim te herstellen. Het plaatsen van een prothese aan de basis van de duim (trapeziometacarpale prothese) bestaat uit het vervangen van het gewrichtdooreengewrichtsprothese (vergelijkbaar met een heupprothese).

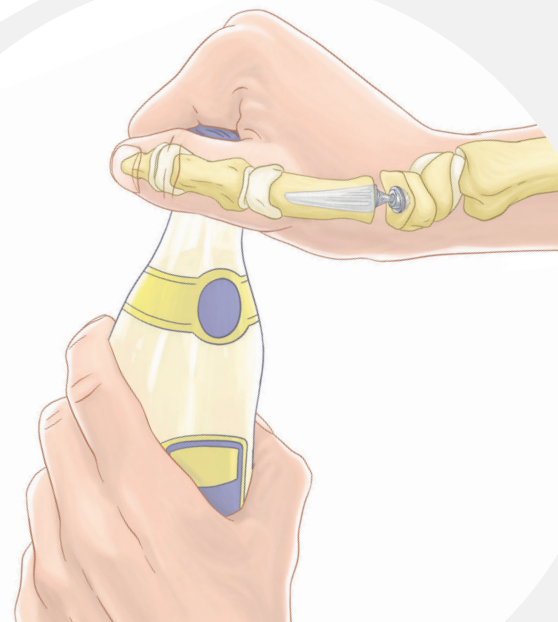

Wat is een TMC prothese ?

Het doel van een trapeziometacarpale prothese is om de beschadigde en pijnlijke delen van het gewricht te verwijderen en te vervangen door een prothese bestaande uit twee metalen onderdelen (cup en steel) bedekt met hydroxyapatiet (die de hergroei van botten bevordert) in contact met het bot, en een tussenstuk dat het gewricht reconstrueert (kop en hals).

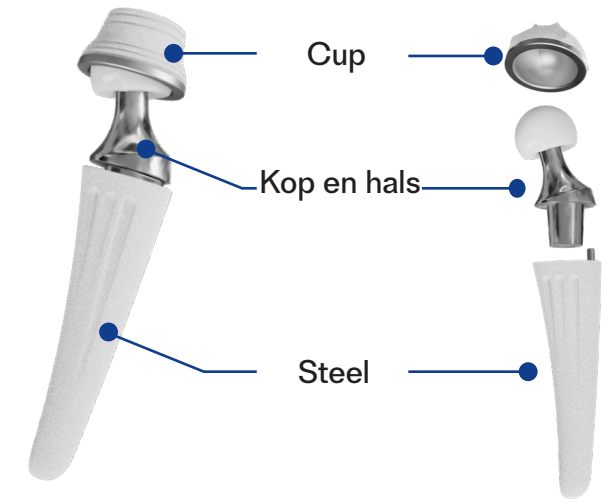

De voorwaarden van de operatie, het ziekenhuisverblijf en de postoperatieve periode worden bepaald door de chirurg. Patiënten moeten zich ervan bewust zijn dat regelmatige controle door hun chirurg tekenen van falen van de prothese kan detecteren voordat er functionele beperkingen optreden.

Welke documenten ontvang ik na de operatie ?

Uw chirurg zal u een persoonlijke implantaatkaart geven, aangevuld met de traceerbaarheidsinformatie van de prothese. Zorg ervoor dat je deze implantaatkaart bij je houdt, bijvoorbeeld in je portemonnee.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen en complicaties ?

Uw chirurg heeft u geïnformeerd over de zeldzame gevallen van complicaties en ongewenste effecten die kunnen optreden na implantatie van een prothese. Raadpleeg uw chirurg als u zich zorgen maakt over de prothese.

Moet ik mijn chirurg zien na de operatie ?

Je chirurg zorgt voor regelmatige follow-up om ervoor te zorgen dat de prothese goed werkt.

Wanneer kan ik mijn dagelijkse activiteiten hervatten ?

Tijdens je follow-up zal je chirurg je uitleggen welke activiteiten je kunt hervatten en hoe snel. Het is belangrijk dat u het postoperatieve protocol volgt dat door uw chirurg is voorgeschreven.

Ik voel pijn in mijn duimgewricht. Wat moet ik hieraan doen ?

Raadpleeg uw chirurg bij pijn, abnormaal gevoel rond uw duimprothese, infectie of na een blessure of val.

Ik moet medische onderzoeken ondergaan. Moet ik mijn chirurg informeren over de aanwezigheid van mijn prothese ?

Het is belangrijk om elke zorgverlener die je raadpleegt te informeren wanneer je een onderzoek ondergaat (bijv. MRI, CT-scan, röntgenfoto). Bovendien mogen er geen injecties worden gegeven in de buurt van het implantaat.

Moet de prothese na verloop van tijd worden vervangen ?

Uw chirurg kan overwegen om de prothese na verloop van tijd geheel of gedeeltelijk te vervangen.

Kan ik reizen na de operatie ?

Ja, maar het is raadzaam om een kopie van de röntgenfoto's met de prothese mee te nemen. Ter informatie: uw prothese kan worden gedetecteerd, afhankelijk van het land en de instelling van de veiligheidspoorten.



De informatie in dit document mag niet in de plaats komen van eventuele informatie die door uw chirurg wordt verstrekt.



UW AGENDA



Consultatie anesthesie

Datum _____ Tijd _____



Chirurgische procedure

Datum _____ Tijd _____



1^e postoperatieve follow-up raadpleging

Datum _____ Tijd _____



2^e postoperatieve follow-up raadpleging

Datum _____ Tijd _____



3^e postoperatieve follow-up raadpleging

Datum _____ Tijd _____

Patient Leaflet - PL_110.01_NI

PATIËNTENBOEKJE

Duimprothese (totale trapeziometacarpale prothese)

Dit boekje is gemaakt in samenwerking met uw chirurg